

# Staalbehandeling bij BDR registratie van diabetespatiënten



Bij voorkeur bloedafname op maandag t.e.m donderdag en onmiddellijke verzending volgens onderstaande richtlijnen

Analyse	Afname tube	Centrifugeren + Afscheiden in Transfertube	Transport t.a.v. Triercentrum UZ Brussel Laarbeeklaan 101 1090 Brussel
---------	-------------	--	---

SERUM 4,9ml

Type1 diabetes  
Auto antilichaam panel



ja



Verzending:

- Dag van boedafname
- Per post
- Op kamertemperatuur

EDTA 2,6ml

Type 1 diabetes  
Genetische merkers



neen

neen

Verzending:



- Dag van boedafname
- Per post
- Op kamertemperatuur

# Staalbehandeling bij BDR registratie van diabetespatiënten



Indien bloedafname op vrijdag t.e.m zondag: verzending bij voorkeur op maandag, volgens onderstaande richtlijnen

Analyse	Afname tube	Centrifugeren + Afscheiden in Transfertube	Transport t.a.v. Triercentrum UZ Brussel Laarbeeklaan 101 1090 Brussel
---------	-------------	--	---

Type1 diabetes Auto antilichaam panel	SERUM 4,9ml 	ja 	Bewaren -20°C Verzending: <ul style="list-style-type: none"><li>• Per koerier</li><li>• Gekoeld met cool pack</li></ul>
--	---	---	--

Type 1 diabetes Genetische merkers	EDTA 2,6ml 	neen neen	Bewaren -20°C Verzending: <ul style="list-style-type: none"><li>• Per koerier</li><li>• Gekoeld met cool pack</li></ul>
---------------------------------------	--	--------------	--